

ApoWIPE

Etanol desinfektion



Rengöring och desinfektion i en och samma servett

ApoWipe® Surface Etanol är en engångsservett för rengöring och ytdesinfektion.

Enkel och effektiv rengöring

Engångsservetten är impregnerad med etanol och färdigblandad med vätska, som förenklar effektivt rengöring av ytor.

Förhindrar spridning av bakterier

God hygien kan ha livsviktig betydelse.

Flergångsmaterial för tvätt av ytor kan innehålla mängder av mikroorganismer.

Dessa mikroorganismer kan inom några få timmar multiplicera ytterligare.

ApoWipe® Ethanol Desinfektion är en engångsprodukt. Därmed förhindras bakteriespridning.

ApoWipe samlar upp bakterier och damm effektivt.

Andvänningsområde

Används på alla ytor och apparat som tål etanol.

ApoWipe®

- Öppna paketet och ta ut en ApoWipe Etanol Desinfektion.
Påsen är säkrad med en barriärfolie som försäkrar att servetten hålls fuktig.
- Rengör och desinficera ytan med engångsservetten.
Varje servett är doserad med färdigblandad etanol, vatten och rengöringsmedel.
- Engångsservetten kan kastas bland vanliga sopor, eller enligt lokala föreskrifter.

ApoWIPE Etanol desinfektion



Användningsområden

ApoWipe® Etanol Desinfektion används till bl.a rengöring och desinfektion i undersökningsrum, operations-salar, intensivavdelningar samt till alla medicintekniska material som tål etanol.

Observera

- Kasta inte använda servetter i toalett
- Använd handskar
- Undgå kontakt med ögon
- Förvara ApoWipe Etanol Desinfektion i ventilerade rum

Produkt information

Innehåll:

Etanol (75-85%) Aqua (vatten) samt Detergenter (såpa)

Varunr.	Produkt	Antal servetter/fp	Antal/fp/trpfp
021840	ApoWipe Etanol Desinfektion, Regular	32 stk	12
021845	ApoWIPE Etanol Desinfektion, Large	24 stk	6

Varunr.	Produkt
021830	Stativ till ApoWipe (Regular och Large)

PartnerMed

Produktchef/ Leg ssk
Irene Faager
irene@partnermed.se
+4673847300
Box 25, 452 21 Strömstad
Hemsida: www.partnermed.se