

# ApoWIPE® Etanol desinfektion

**Rengöring och desinfektion i en och samma servett.**  
**ApoWipe Disinfecton 80% ETANOL är engångsdukar för samtliga ytor och instrument som tål etanol**

## Enkel och effektiv rengöring

Engångsservetten är impregnerad med etanol och färdigblandad med vätska som förenklar effektiv rengöring av ytor

## Förhindrar spridning av bakterier

God hygien kan ha livsviktig betydelse. Flergångsmaterial för tvätt av ytor kan innehålla mängder av mikroorganismer. Dessa mikroorganismer kan inom några timmar multiplicera sig ytterligare. ApoWipe Etanol Disinfection är en engångsprodukt. Därmed förhindras bakteriespridning. ApoWipe samlar upp bakterier och damm effektivt.

## Användningsområden

Apo Wipe Etanol används till bl.a rengöring och desinfection i undersökningsrum, operationssalar, intensivvårdsavdelningar samt till alla medicinska material som tål etanol

## ApoWipe bruksanvisning

- Öppna paketet och ta ut en Apo Wipe Etanol Disinfection.  
Påsen är säkrad med en barriärfolie som säkrar at servetten hålls fuktig.
- Rengör och desinficera ytan med engångsservetten.  
Varje servett är doserad med en färdigblandad etanol och vatten
- Engångsservetten kan kastas bland vanliga sopor, eller enligt lokala avfallsföreskrifter

## Obeservera

- Kasta inte använda servetter i toaletten
- Använd handskar
- Undgå kontakt med ögonen
- Förvara Apo Wipe Etanol i ventilerande rum

## Apo Wipe Innehåller:

Etanol ( 75 -85%), Aqua (vatten)



## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Artnr	Produktbeskrivelse	Antal pr fp	Antal pr kartong
021870	ApoWipe Desinfection Regular- Storlek 30 x 22 cm	32 stk	12 pk
021875	ApoWipe Desinfection Large - Storlek 42 x 30 cm	24 stk	6 pk
021830	Stativ till ApoWipe Desinfection Regular+ Large		

Läs mer om Apo Wipe Desinfection på: [WWW.partnermed.se](http://WWW.partnermed.se)